

## Tárgy:Termékreferencia

I.számú Sebészeti Klinikán alkalmazott Aquamed törölkendő és Aquamed Nedves bőrtisztító kendő kipróbálási lehetőségét tisztelettel köszönjük!

Tapasztalataink a fürdető kendővel:

1. Használata gyors, egyszerű.
2. A beteg bőrén levő szennyeződések hatékonyabban eltávolítja, mint a hagyományos módszer (lavóros mosdatás).
3. A beteg számára kíméletesen tisztít és egyben ápolja bőrét, nincs szükség bőrápoló használatára.
4. Anyag és-, időtakarékosabb vele a mosdatás.
5. Az ápoló személyzet fizikai terhelése csökkent a mosdatás során.(Nem kell lavórt vízzel az ágyhoz vinni)
6. Operált betegek esetén a műtéti terület (kötés),semmilyen körülmények között nem lett nedves, beteg és az ápoló számára a terhelés csökkent,(mivel nem kellett átkötözni a sebet emiatt),ezenkívül ágyneműt is csak indokolt szennyeződés esetén kellett cserélni, nem azért mert vizes lett. Ez is anyag és időtakarékos!!

Tapasztalatok a tisztító kendővel:

1. A kendő hatékonyan tisztít, és egyben ápol is.
2. Megfelelő a mérete!!!
3. Kellemes az illata és a tapintása.

2011.11.10

Tisztelettel:  
Tábikné Frombach Erika  
Osztályvezető főnővér

**FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÁROLYI SÁNDOR KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET  
I. BELGYÓGYÁSZAT  
1041 Budapest, Nyár utca 103.**

**Tárgy : Termékreferencia**

Osztályunkon az Aquamed törülőkendő gazdaságosabbnak bizonyult a hagyományos módszernél. A beteg és az ápoló szempontjából kényelmesebb és praktikusabb a használata, lerövidül a mosdatási idő, a lavór használatának mellőzésével kevesebb terhelés éri az ápolók gerincét. Jó illatú, a beteg bőrét hidratálja, a szennyeződést megfelelően eltávolítja.

**Budapest, 2005. május 2.**

**Üdvözlettel :**

**Gidró Istvánné  
Osztályvezető főnővér**

tárgy: Bedbath: fürdetőkendő

### Termékreferencia

A kipróbálásra kapott Aquamed fürdetőkendőt lélegeztetett, nem mobilizálható betegnél használtuk. A kendő használata során a következő pozitív tapasztalataink voltak:

- Használata egyszerű és gyors, idő és energiatakarékos mind az ápoló, mind a beteg részéről (nem igényel különösebb előkészítést).
- A beteg bőrének kiszáradását meggátolja, nincs szükség hidratáló krém alkalmazására.
- A szennyeződések egyszerűbben és gyorsabban eltávolítja, mint a hagyományos módszer

A sapka használata valóban megegyezik egy hajmosással, a beteg fejbőre felfrissült, pár nap eltelte után is tiszta haj benyomását keltette.

Pécs, 2005. január 25-én

Tisztelettel

Darányi Agóta  
osztályvezető főnővér



FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
**JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ**  
Anaesthesiológiai, Intenzív Betegellátó és Sürgősségi Osztály  
Osztályvezető: dr. Diószeghy Csaba főorvos  
1204 BUDAPEST, KÖVES U. 1.  
☎: 284 7610, ☒: 284 7605

---

**Óváriné Gáthy Zsuzsanna**

**HELYBEN**

**Tisztelt Igazgató Asszony!**

Az Intenzív Osztályra kipróbálásra küldött Aquamed termékcsaládról az alábbi véleményt adjuk:

A termékek nagymértékben megkönnyítették főleg a fekvő betegek hygienikus ellátását, a használat során allergiás reakciókat, bőrkiszáradást nem észleltünk.

A felület fertőtlenítő kendő megfelelt az előírásoknak lélegeztető gépek, pumpák fertőtlenítéshez használata egyszerű.

Lehetőség szerint szívesen alkalmaznánk folyamatosan az osztályon.

Budapest, 2005. február 2.

Tisztelettel:

Stefán Andrásné  
oszt .vez . főnövér

## Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet

---

Főigazgató: Prof. Dr. Nyáry István

1145. Budapest, Amerikai út 57.

tárgy: termékreferencia

Számításaink szerint a Aquamed törülőkendő gazdaságosabb az általunk használt hagyományos módszernél ill. higiénikus megoldásnál, beleértve a különböző testméret és szennyezettség esetén is figyelembe vett fogyasztást. A beteg és az ápoló szempontjából is lényegesen kényelmesebb, praktikusabb a használata.

Nagyobb testfelületen történő használata esetén is kielégítően eltávolítja a mikro-szennyeződést és a száraz hámsejteket, ugyanakkor a beteg bőrének hidratálása is megoldott.

Budapest, 2004. december 1.

Nehéz Erzsébet  
ITO vez. főnövér

## GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

### Tárgy: Termékreferencia

#### **AQUAMED FÜRDETŐ KENDŐ**

Intézetünkben a hagyományos módszerrel mosdattunk az elmúlt év közepéig. A régi módszerrel időigényes és a beteg számára is megterhelő volt a mosdatás, mivel sokszor a korai órákban kellett felébreszteni őket, a nővérek pedig a mosdatás alatt minimálisan tudtak csak a többi betegre figyelni. Az új módszerrel radikálisan lecsökkent a mosdatási idő. Számításaink szerint a Bed Bath fürdető kendő gazdaságosabb az általunk használt módszernél illetve a keresztfertőzéseket minimálisra csökkenti. Pl.: időben: egy gépes beteg mosdatása általában 1-1 és negyed óra volt. A Aquamed fürdető kendővel maximum 20 perc.

#### **HAJMOSÓ SAPKA**

Mint majdnem minden intézetben, nálunk is nehezen megoldható volt a betegek hajmosása. A sapka használata lényegesebben korszerűbb, a beteg szempontjából nem megterhelő. A kendő jól tisztította a fejbőrt is. Nem igényel egyéb felszerelést.

#### **AQUAMED TISZTÍTÓ KENDŐ**


A kendő használata a beteg tisztításánál, a beteg és a nővér szempontjából is kényelmesebb, gyorsabb és gazdaságosabb. Tartalmazza a megfelelő mennyiségű nedvességet és bőrápolószert. Kezdődő felfekvésnél is használható.

Budapest, 2005. január 20.

Tisztelettel,

Varga Erika  
Intenzív osztályos főnővér

GOTTSEGEN GYÖRGY  
ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET  
KARDIOLÓGIAI OSZTÁLY  
CORONARIA ÓRZÓ

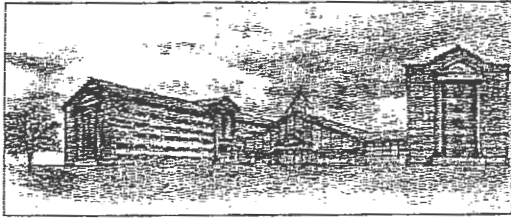

*Arany Alkony Kht. II. Idősek  
Otthona  
1156 Budapest  
Bánkút u. 67-69.*

---

## **Aquamed tisztálkodási termékek értékelése**

### **Aquamed Shampoo Cap**

Aquamed öblítésmentes hajmosósapkát kipróbálásra kaptuk. Ágyhoz kötött betegünkönél próbáltuk ki az előírás, tájékoztató szerint. Nagyon praktikusnak találtuk, hogy mikrohullámú sütőben melegíthető és öblítést nem igényel. Az öblítésmentes fürdető sapkával mosott haj fénylő, csillogó, ápoló lett.

Ágyhoz kötött betegnél nagyon jól használható, nem időigényes és nagyon egyszerűen kivitelezhető hajmosást biztosít.

### **Aquamed Bed Bath Fürdető Kendő**

Aquamed fürdető kendő azért nyerte el a tetszésünket, mert az ágyhoz kötött betegeinket nem tudjuk a fürdőbe kivinni, és eddig a teljes ágyfürdő nagyon sok időt és munkát igényelt. A fürdető kendő használata rádöbbenet arra, hogy mennyivel egyszerűbben is meglehet egy ágyhoz kötött beteget fürdetni. Használata egyszerű és praktikus. A beteg elmondása szerint nagyon jó közérzetet, tisztaságérzetet ad.

### **Aquamed Nedves Bőrtisztító Kendő**

A nedves bőrtisztító kendőt pelenkázásnál használtuk (pelenkacserénél) lemosás helyett. Nagyon jól tisztít és egyben ápolja is a bőrt. Külön említést igényel a törlőkendő nagy mérete, mert pelenkázás során nagyon előnyös, hogy csak egyet kell elhasználni belőle.

Köszönjük, hogy megismerhettük és kipróbálhattuk az Aquamed tisztasági termékeket.

Részlegvezető ápoló

Baranya Megyei Kórház  
Kp. Bel.amb.

## Referencia

### *Aquamed fürdető kendő*

Az ambulanciánkra érkező elhanyagolt állapotú, nehezen mobilizálható betegeknél alkalmaztuk a Aquamed fürdető kendőt. A kolléganők pozitív tapasztalatokat szereztek használata során. A betegek bőrén lévő szennyeződések egyszerűen, gyorsan, erősebb dörzsölés nélkül el lehet távolítani, mosdatásuk során nem lesz vizes az ágy.

A kendő használata meggyorsítja a munkavégzést.

Pécs, 2005. január 27.

Vankó Erika  
részleg vezető főnővér



**Cím:** *Gliedné Tillmann Erzsébet*  
*Ápolási igazgató*

**Tárgy:** Aquamed Bed Bath - fürdető kendő véleményezése

**Tisztelt Igazgatónő!**

Osztályunkon örömmel próbáltuk ki az Ön által kipróbálásra ajánlott fürdető kendőt.

**Megfigyelési szempontjaink a következők voltak az alkalmazásnál:**

- A betegek tájékoztatását követően, szóbeli beleegyezés után történt.
- A sérültek kiválasztása alapápolási kategóriába sorolás alapján történt.
- Az alkalmazás kivitelezése az intézményi protokollok figyelembevételével végeztük.
- A betegek objektív és szubjektív véleménye.
- Az ápolók tapasztalata.

**Tapasztalatainkat a következő táblázat foglalja össze:**

<b>KRITÉRIUMOK</b>	<b>FÜRDETŐ KENDŐ</b>	<b>HAGYOMÁNYOS ÁGYFÜRDŐ</b>
<b>1. Időtartam:</b> - A <sub>2</sub> kategóriájú betegnél: - A <sub>3</sub> kategóriájú betegnél:	- 5 perc 15 s - 7 perc 20 s	- 21 perc 17 s - 35 perc 10 s
<b>2. Előkészítés időtartama:</b>	- 5 perc	- 10 perc
<b>3. Eszközhasználat:</b>	- 1 db fürdető kendő - 1 db lepedő - 1 db párnahuzat - 1 db vesetál - 1 db pizsama	- 2 db mosdószivacs - 1 db mosdótál - 2x5 liter testhőmérsékletű víz - 2 db törölköző - 3 db lepedő - 1 db paplanhuzat - 2 db párnahuzat - Bőrvédelemhez: Medifleur gél

Az **Aquamed** kendőt öt betegnél alkalmaztuk, továbbá személyi feltételeket illetően három ápoló vett részt.

*A betegek objektív és szubjektív véleménye, a kendő alkalmazását követően verbális közléseik alapján (100 %-ban).*

- Vizes hatást kelt.
- Nem szükséges törölköző használata.
- Nem vizesedik az ágynemű.
- Frissítő hatású.
- Javul a közérzet, hosszabb ideig friss hatást éreznek.

*Az ápolók tapasztalatai az Aquamed fürdető kendőről:*

- Csökken az ágyfürdő előkészítéséhez szükséges idő, ápolási eszköz.
- Kevesebb idő szükséges a teljes ágyfürdőhöz.
- A lepedő cseréjére csak kivételes szennyeződés esetén van szükség.
- A műteti sebet fedő kötszer különösebb védelme nem szükséges.
- Objektíven a betegek komfortérzete javul.
- A kórtermek zsúfoltsága kompenzálható a kevesebb ápolási eszközt igénylő ágyfürdőhöz. ( Mosdótál elhelyezése).
- Bőrvédelemhez a betegek kérésére további Medifleuros kezelés nem szükséges.

*Egyéb észrevételek:*

- A szennyeződött bőrről a vér kendővel könnyedén eltávolítható.
- Más váladékkal történő szennyeződés eltávolításához azonban újabb törlőkendő használata szükséges. (Széklet, hányadék, erősebb vérzést követő, rászáradt vér eltávolítása).
- Dekubitusz esetén további bőrvédelem szükséges.

**Köszönettel:**

**Horváth Jozsefné**  
*Osztályvezető ápoló*

Szekszárd, 2005. június 27.



Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház  
Anaesthesiológiai és Központi Intenzív Therápiás Osztálya  
Intézet Kódja: 01121, Osztály kódja: 1502  
Budapest, X. Maglódi u. 89-91. Tel.: 432-7680  
Osztályvezető főorvos: dr. Völgyes Barbara

## Referencia

### *Aquamed fürdető kendő.*

*Osztályunkon (Bajcsy Kp. Intenzív) a Bedbath fürdető kendőt, elsősorban lélegeztetett, nehezen mozgatható betegeink, testi higiéniájének biztosítására használjuk,*

*A kendő használata során pozitív visszajelzést kaphatunk ápolóinktól az alább felsoroltakra vonatkozóan:*

- Használata egyszerű, gyors.*
- A kendő használata során, a beteg bőrén lévő szennyeződést /vér, stb/ erősebb dörögölés nélkül el lehet távolítani.*
- Megfelelő mennyiségű folyadékot tartalmaz.*
- Összetételéből adódóan a beteg bőrét ápolja is.*
- A beteg mosdatása során nem lesz vizes az ágy.*
- Az intravazálisan behelyezett kanülök sterilizálása megoldhatóbb.*

*Budapest, 2004. november 2.*

*Tisztelettel:*

Fővárosi Önkormányzat  
Bajcsy - Zsilinszky Kórháza  
Anaesthesiológiai és  
Központi Intenzív Therápiás Osztálya  
osztályvezető főorvos: Dr. Völgyes Barbara  
1106. Bp. Maglódi u. 89-91.  
Tel: 432-76-80

*Milák Józsejné  
o.v. főnővér*